

Quik
"Quality is the key"

www.quik.com.co



Jeringa de gases arteriales

"Contact Center":

+60 1 222 91 51 • +57 318 271 1649 • contact.center@quik.com.co



@quik.quality



@quik_quality



@Quik_Quality



quik-quality-is-the-key

Aliados estratégicos



1 Jeringa para gases arteriales

Jeringa de gases arteriales de 1 ml con Heparina de calcio, con Luer.

Características

- Tipo de extracción: arterial y venosa
- Jeringa con anticoagulante: Heparina equilibrada con calcio.
- Concentración de la preparación: 50 UI/ml sangre.
- Preparación etiqueta / impresión: con etiqueta de plástico.
- Color impresión etiqueta: naranja.
- Graduación: Escala nominal.
- Ámbito de aplicación: Análisis de gas en sangre.
- Conexión: Luer (m).


Dimensiones

- Volumen nominal 1 ml.
- Diámetro: 11 mm.
- Longitud incluido el tapón: 82 mm.
- Longitud sin tapón: 66 mm.
- Longitud con tapón y embolo: 100 mm.



1 Instrucción de uso

Jeringa de gases arteriales de 1 ml con Heparina de calcio, con Luer.

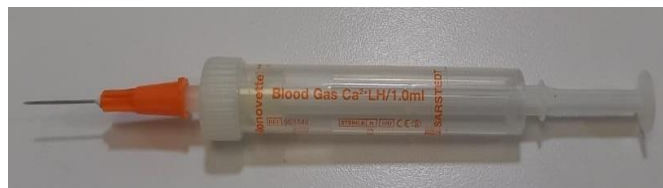


2. Empalme la aguja al cono Luer de la jeringa de gases arteriales




4. Retire la aguja y coloque nuevamente el tapón protector naranja. Mezcle la muestra de sangre inmediatamente después de recolectarla girando la jeringa de gases arteriales entre sus palmas 10 veces como se observa en la sección de recomendaciones de este folleto

2 Recomendaciones generales

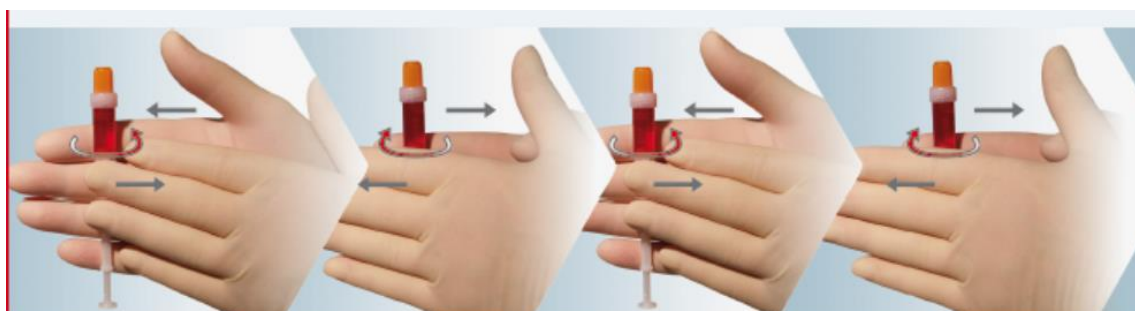

Mezcle la muestra de sangre inmediatamente después de recolectarla girando la jeringa de gases arteriales entre sus palmas 10 veces

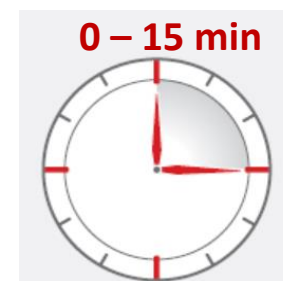

Los análisis deben realizarse dentro de los primeros 15 min de haber recolectado la muestra

* El tiempo máximo de procesamiento de la muestra es de 30 min a temperatura ambiente.

Triana Reyes, M. del P. Toma de muestra para gases arteriales y venosos. En: Estupiñán Pérez, VH. Ed. científico. Bases para la interpretación y análisis de gases arteriovenosos. Cali, Colombia: Editorial Universidad Santiago de Cali, 2020. p. 15-28.

3 Relación anticoagulante jeringa BD vs SARSTED

Proveedor	Volumen	Concentración Heparina	Heparina equilibrada
Sarsted	1.0 mL	50 UI/MI	Calcio
BD	1.0 mL	30 UI/MI	Litio
	3.0 mL	80 UI/mL	

4 Código QR video de toma de muestra con jeringa gases arteriales



Sarsted: <https://www.sarstedt.com/es/productos/diagnostico/gas-en-sangre/producto/dmsarproducts/specificationPdf/Product/05.1146.020/>