


S-Monovette® para gas en sangre

Jeringa para gases sanguíneos

Preparación:

Heparina de litio equilibrada con calcio

1. Jeringa que permite extracción de muestra de gases venosos y arteriales, con **Heparina de litio equilibrada con calcio** (50 UI/ml): anticoagulante líquido y pulverizado en la pared de la jeringa. Esta concentración reduce la formación de coágulos.
2. Anticoagulante equilibrado con calcio lo cual permite procesar electrolitos sin que se alteren los resultados.
3. Aguja y jeringa en empaque individual cada una independiente, debidamente estériles, calibre a preferencia del usuario 23G x 1" y 25G x 5/8
4. Conexión Luer que permite tomar directo en catéter y conectar a la aguja.
5. Producto de alta calidad a bajo costo.
6. Tope de un 1 ml que permite la mezcla de la jeringa sin contacto con la muestra.

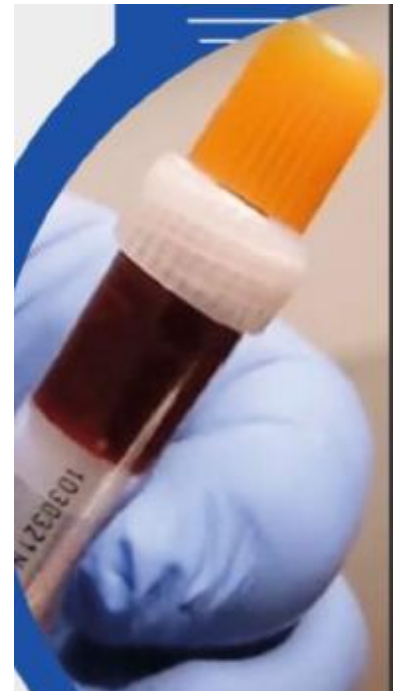

Instrucciones de uso



1

Remueva el tapón protector naranja de la jeringa de gases arteriales.



2

Empalme la aguja al cono Luer de la jeringa de gases arteriales.




3

Recolecte la sangre tirando del émbolo lentamente de acuerdo con los procedimientos estandarizados del laboratorio.



4

Retire la aguja y coloque nuevamente el tapón protector naranja. Mezcle la muestra de sangre inmediatamente después de recolectarla girando la jeringa de gases arteriales entre sus palmas 10 veces como se observa en la sección de recomendaciones de este folleto.

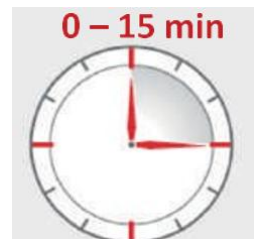

Recomendación

Los análisis deben realizarse dentro de los primeros 15 min. de haber recolectado la muestra.



Mezcle la muestra de sangre inmediatamente después de recolectarla girando la jeringa de gases arteriales entre sus palmas 10 veces.